

Diabetesdata och detaljerade rapporter – dela när som helst med ditt diabetesteam

Kom igång med appen mySugr

- 1 Ladda ned mySugr från App Store (iOS) eller Google Play (Android).
- 2 Skapa ett konto på mySugr.
- 3 Lås upp mySugr gratis för avancerade PDF-rapporter och andra funktioner:



Para ihop din Accu-Chek®-mätare för obegränsad tillgång till mySugr Pro.

Gå till "Anslutningar" i menyn för att para ihop mobil och mätare.



Har du ingen blodsockermätare från Accu-Chek®? Du kan ändå få 6 månader gratis med mySugr Pro

Använd koden 2020-2020-2020 på shop.mysugr.com/en/voucher.

Koden gäller t o m 30 september, 2020.

- 4 Importera dina blodsockervärden automatiskt från din Accu-Chek-mätare och/eller logga dina data manuellt.


Håll kontakten: Dela dina rapporter från mySugr med ditt diabetesteam.

Dela PDF-rapporter med 2 veckors eller 3 månaders diabetesdata. ([Se instruktionsfilm här.](#))


Så skapar du en rapport och delar data




Välj "Rapport" från menyn

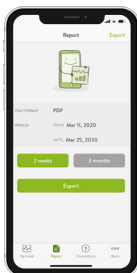

Välj önskad tidsperiod och tryck på "Exportera"

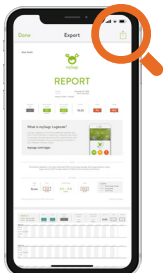

Tryck på dela-ikonen

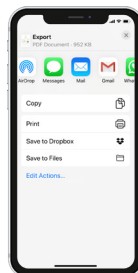

Välj den app du vill dela rapporten med



Fler än 2 miljoner registrerade användare

Användarbetyg: 4.6